

United Vision

---

*Manuel D'utilisation  
du module Speech  
pour le ClearView C*

---

# 1 Connaître votre ClearView C Speech

Ce chapitre vous familiarisera avec l'utilisation du ClearView C Speech d'Optelec.

## 1.1 Allumer et éteindre votre ClearView C Speech

Pour allumer à la fois le module du ClearView C Speech et le ClearView C, appuyez sur le bouton marche/arrêt.

Votre ClearView C prendra environ 10 secondes pour afficher une première image. Le processus de démarrage du ClearView C Speech prendra quant à lui 40 secondes approximativement. Le ClearView C Speech émet un son de démarrage pour vous indiquer qu'il est prêt à être utilisé.

Pour éteindre votre ClearView C Speech, appuyez de nouveau sur le bouton marche/arrêt. Le ClearView C Speech prendra approximativement 40 secondes pour s'éteindre, après que le ClearView C se soit éteint.

## 1.2 Réinitialiser le ClearView C Speech

Si votre ClearView C Speech a besoin d'être réinitialisé, appuyez sur le bouton noir qui est situé sur le côté droit du moniteur, juste au-dessus du lecteur de carte SD. Ceci éteindra votre ClearView C Speech, le processus prendra environ 15 secondes. Appuyez de nouveau sur ce bouton après 15 secondes pour rallumer votre ClearView C Speech. Après environ 40 secondes, vous entendrez le son de démarrage qui vous indique que le ClearView C Speech est à nouveau prêt à être utilisé.

## 1.3 Guide de démarrage

Pour bien démarrer avec votre ClearView C Speech:

### Étape 1:

Allumez le ClearView C Speech en appuyant sur le bouton rouge.

### Étape 2:

Après 40 secondes, le ClearView C Speech émet un son indiquant qu'il est prêt. Touchez l'écran une fois pour activer l'audio.

### Étape 3:

Placez le document que vous désirez lire sous le ClearView C Speech, à l'intérieur des lignes de contour, comme indiqué à l'écran.



#### Étape 4:

Touchez l'écran pour activer le processus de saisie de document et pour démarrer la lecture audio. Ceci peut prendre de 15 à 20 secondes.



#### Étape 5:

Une voix commencera la lecture du document et les différentes parties du document seront indiquées à l'écran à l'aide de points bleus numérotés. Touchez un point bleu pour lire cette partie du texte.



#### Étape 6:

Appuyez sur le bouton Pause pour suspendre la lecture audio.



#### Étape 7

Sélectionnez une autre partie du texte en touchant un autre point bleu.



#### Étape 8:


Appuyez sur le bouton marqué d'un "X", lequel est situé à l'extrémité droite de la barre de boutons, pour retourner en mode ClearView C. Appuyez et maintenez appuyé ce même bouton pour saisir une nouvelle page.



## 1.4 La barre de boutons

L'illustration suivante vous montre la barre de fonctions du ClearView C Speech. Cette barre de fonctions vous permet de lancer ou suspendre la lecture audio, d'ajuster le grossissement, le volume ou la vitesse de la lecture audio, d'activer le menu et de sortir du mode Audio pour retourner dans le mode ClearView C.

Vue d'ensemble :

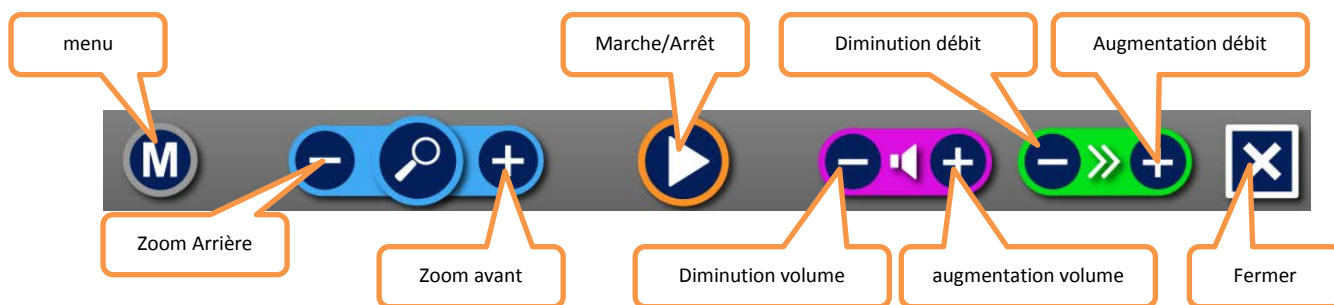

**Le bouton Marche/Arrêt:** Le bouton orange au centre de la barre de fonctions sert à lancer ou interrompre la lecture audio.

**Grossissement:** Le bouton “-” de couleur bleue diminue le grossissement. Le bouton “+” de couleur bleue augmente le grossissement. Le bouton illustré d'une loupe entre les deux boutons bleus permet quant à lui de passer à une vue d'ensemble ou de revenir au dernier niveau de grossissement utilisé.

**Volume** Le bouton “-” de couleur violette diminue le volume de la lecture audio. Le bouton “+” de couleur violette augmente le volume de la lecture audio.

**Vitesse de lecture** Le bouton “-” de couleur verte diminue la vitesse de lecture. Le bouton “+” de couleur verte augmente la vitesse de lecture.

**Mode ClearView C** Appuyez sur le bouton blanc marqué d'un “X” pour revenir en mode ClearView C. Appuyez sur ce même bouton en le maintenant enfoncé pour saisir une nouvelle image.


**Le bouton Menu** Le bouton gris marqué de la lettre “M”, situé à la gauche de la barre de fonctions sert à entrer dans le menu.

## 1.5 Mode de lecture

Le ClearView C Speech dispose de deux modes: le mode ClearView et le mode Audio.

Lorsqu'utilisé en mode ClearView C, l'utilisation du ClearView C demeure inchangée. Tous les boutons du ClearView C, situés sur le plateau de lecture, fonctionnent exactement comme si le ClearView C était utilisé sans le module ClearView C Speech. Pour utiliser la fonction standard du téléagrandisseur ClearView C, veuillez-vous référer au manuel du ClearView C.

Pour activer le mode Audio, touchez une seule fois l'écran. Lorsqu'un son vous indique que le mode Audio est allumé, placez le document que vous désirez lire sur le plateau de lecture, à l'intérieur des lignes de contour et touchez l'écran une seconde fois pour démarrer la lecture. Le ClearView C Speech saisira le document et en débutera la lecture après quelques secondes. Pour lire un autre texte, appuyez et maintenez enfoncé le bouton marqué d'un "X", placez une nouvelle page à l'intérieur des lignes de contour sur le tableau de lecture, puis touchez l'écran. Pour quitter le mode Audio, appuyez sur le bouton blanc marqué d'un "X" à la droite de la barre de fonctions, en bas à droite de l'écran.

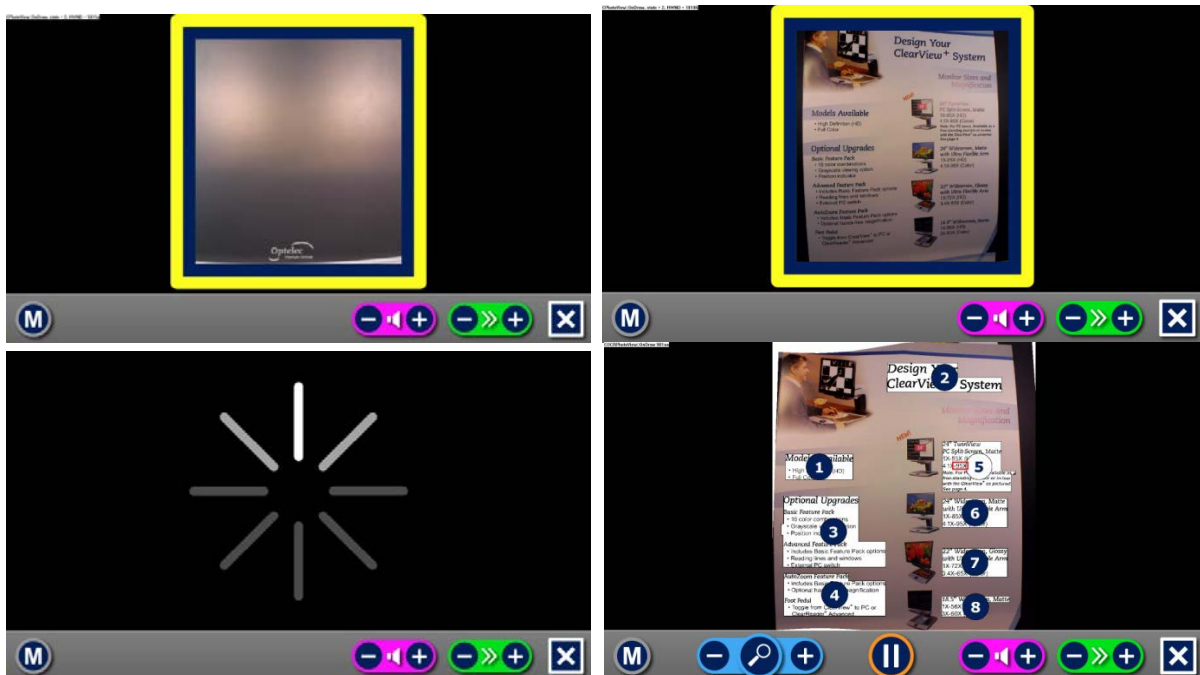

## 1.6 Vue d'ensemble et zones de lecture

Le ClearView C Speech affiche toujours une vue d'ensemble de la page entière lorsqu'il commence à lire cette page pour la première fois. Dans cette vue d'ensemble, des points bleus numérotés marquent différentes parties du texte dans le document. Ces points bleus vous permettent de naviguer à travers le texte plus rapidement. Touchez un de ces points bleus pour débiter la lecture audio de la partie du texte sélectionnée. Les points bleus sont numérotés selon l'ordre le plus probable du texte. Le point bleu numéro 1 sera lu en premier, suivi du point bleu numéro 2, et ainsi de suite.

## 1.7 Agrandir un document

Pour quitter la vue d'ensemble de la page entière avec points d'aide à la navigation et agrandir votre document, appuyez sur le bouton bleu marqué d'un "+" qui se trouve du côté gauche de la barre de fonctions, à droite du bouton sur lequel est illustrée une loupe. Pour diminuer le grossissement, appuyez sur le bouton bleu marqué d'un "-", à gauche du bouton illustré d'une loupe. Le grossissement est à son minimum lorsque le document est affiché en vue d'ensemble avec les points de navigation. Pour passer rapidement du mode vue d'ensemble au dernier grossissement utilisé, et vice-versa, appuyez sur le bouton illustré d'une loupe.

## 1.8 Lire un document

Pour débiter la lecture, appuyez sur le bouton Marche au milieu de la barre de fonctions. Pour suspendre la lecture, appuyez de nouveau sur ce même bouton. Le ClearView C Speech met en surbrillance la partie déjà lue. Pour débiter la lecture d'une autre partie du texte, touchez au point bleu correspondant dans la vue d'ensemble, ou agrandissez le texte et touchez au mot à partir duquel le ClearView C doit continuer la lecture.

## 1.9 Parcourir un document


Pour faire défiler votre document agrandi vers le haut ou vers le bas, vers la gauche ou vers la droite, il suffit de poser votre doigt sur l'écran et de le glisser dans la direction désirée.

## 1.10 Couleur du texte

Afin d'accroître le contraste d'un texte, il vous est possible de changer les couleurs de l'avant-plan et de l'arrière-plan de celui-ci. Ceci n'aura pas d'influence sur l'affichage des photos car celles-ci sont toujours affichées dans leurs couleurs originales. Si un contraste accru n'est pas nécessaire, le texte peut être affiché dans ses couleurs originales. Veuillez-vous référer au chapitre suivant pour configurer les couleurs de contraste élevé.

## 2 Le menu du ClearView C Speech

Ce chapitre vous familiarisera avec le menu du ClearView C Speech.

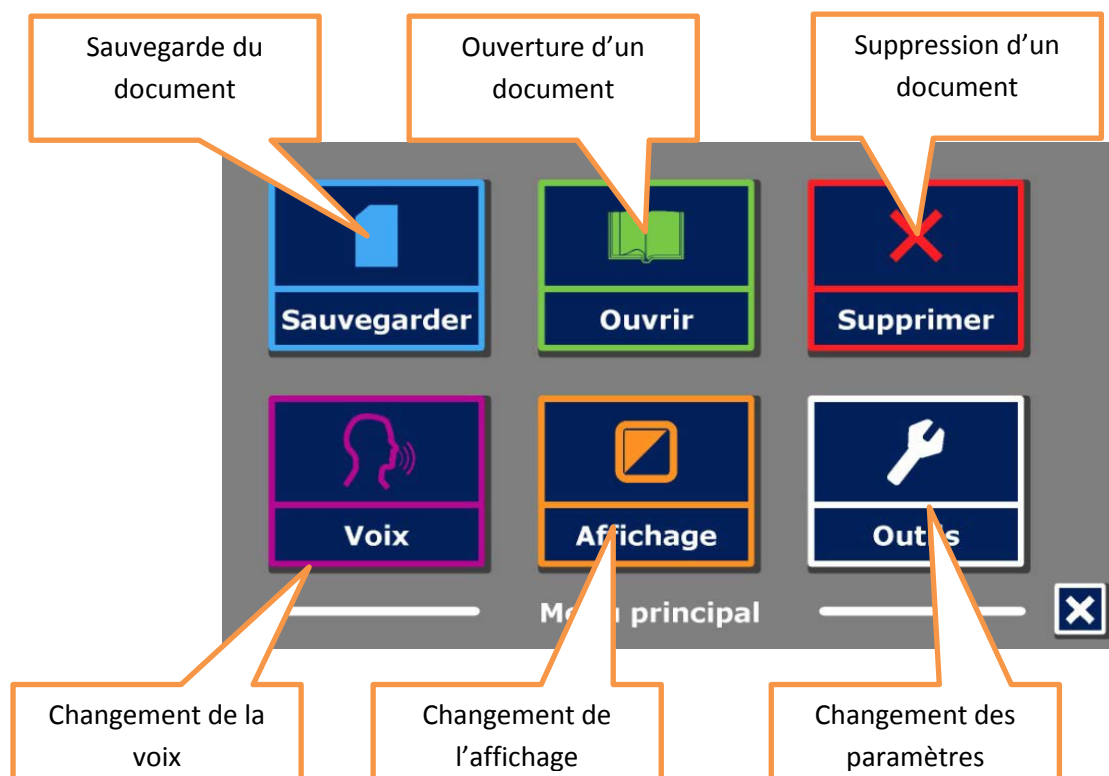

### 2.1 Ouvrir et fermer le menu

Pour activer le menu, appuyez sur le bouton gris Menu. Le bouton Menu est le bouton marqué de la lettre "M" à l'extrémité gauche de la barre de fonctions. Pour fermer le menu, appuyez sur le bouton blanc marqué d'un "X" en bas à droite du menu. Tous les changements effectués dans le menu sont automatiquement sauvegardés.

### 2.2 Utiliser le menu


Le menu du ClearView C Speech comporte deux rangées de trois grosses touches. Pour activer une fonction, touchez cette touche une fois. L'activation d'une fonction sert soit à changer un paramètre ou à ouvrir un sous-menu ou une liste. Si une touche apparaît en gris, cette fonction n'est pas disponible.

Le menu contient les fonctions suivantes:

- Sauvegarder
- Voix
- Ouvrir
- Affichage
- Supprimer
- Réglages

## 2.3 Sauvegarder

Pour sauvegarder un document, ouvrez le menu et appuyez sur la fonction "Sauvegarder". Le ClearView C Speech vous demandera d'abord si vous désirez sauvegarder avec une étiquette vocale.

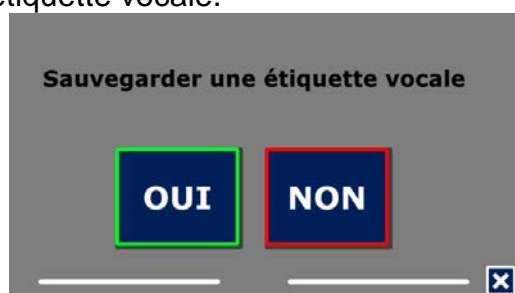

Si vous désirez sauvegarder votre document sans étiquette vocale, choisissez l'option "Non". Le document sera sauvegardé sous le nom de la première ligne de ce document. Si vous désirez ajouter une étiquette vocale, choisissez l'option "Oui". Un bip sonore se fera entendre, tout de suite après lequel vous aurez 5 secondes pour enregistrer votre étiquette vocale. À la fin de ces 5 secondes, vous entendrez un autre bip. Le document est alors sauvegardé avec l'étiquette vocale enregistrée.

Une fois le document sauvegardé, le ClearView C Speech vous demandera si vous voulez ouvrir plus de pages.



Si vous sélectionnez "Non", le menu se fermera et le document réapparaîtra à l'écran. Si vous choisissez "Oui", vous pouvez ajouter d'autres pages au document en plaçant la page à ajouter à l'intérieur du contour sur le plateau de lecture et en touchant l'écran une fois pour l'ajouter au document. Lorsque vous avez terminé d'ajouter des pages au document, appuyez sur le bouton Fermer, qui est marqué d'un "X".


Le ClearView C Speech vous demandera si les nouvelles pages doivent être converties en format texte. Si vous appuyez sur "Non", la conversion en format texte sera faite lors de la lecture du document. Si vous appuyez sur "Oui", toutes les pages seront converties en format texte avant de retourner en mode lecture. Ce procédé peut prendre jusqu'à plusieurs minutes, selon le nombre de pages à traiter. Par défaut, le ClearView C Speech sauvegardera le document sur la carte SD qui vous est fournie.

Si vous désirez plutôt sauvegarder votre document sur une clé USB, insérez une clé USB dans le lecteur du ClearView C Speech. Lorsqu'une clé USB est branchée au ClearView C Speech, le document est automatiquement sauvegardé sur celle-ci.



## 2.4 Ouvrir

Pour ouvrir un document, ouvrez le menu et appuyez sur le bouton vert “Ouvrir”. Appuyez sur “Document” pour voir défiler la liste des documents sauvegardés. Les documents les plus récents apparaîtront les premiers. Pour ouvrir et regarder des images ou photos, appuyez sur “Images”.

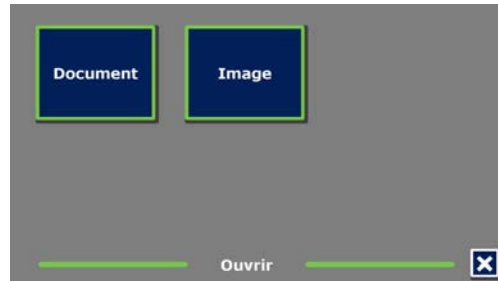


Parcourez la liste des documents ou images en vous aidant de la barre de défilement à droite de l'écran.



Choisissez parmi la liste le document ou l'image que vous désirez lire ou regarder. Le menu se fermera et le document ou l'image sélectionnée s'ouvrira.

## 2.5 Supprimer

Pour supprimer un document, ouvrez le menu et appuyez sur le bouton “Supprimer”. Une liste de vos documents apparaîtra. Sélectionnez le document que vous désirez supprimer.

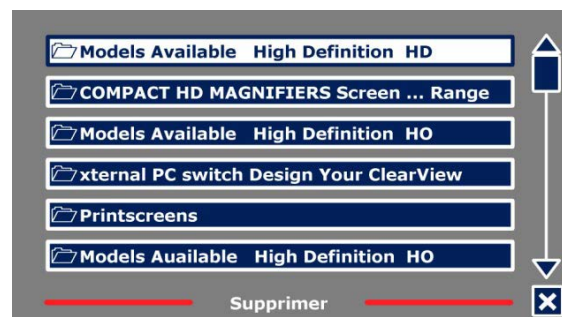

Le ClearView C Speech vous demandera de confirmer que vous désirez supprimer ce document.

Pour le supprimer, choisissez “Oui”. Pour annuler la suppression du document, choisissez “Non”. Les deux choix vous ramèneront à la liste de documents.

## 2.6 Voix

Ce menu vous permet de choisir la voix de lecture et la langue. Pour choisir une autre voix de lecture, appuyez sur le bouton "Voix".



Le ClearView C Speech passera à la prochaine voix activée. Si la nouvelle voix est dans une autre langue, les menus deviendront automatiquement en cette langue. Pour ajouter ou supprimer des voix de lecture ou des langues parmi ces choix, référez-vous au chapitre 2.8.1.

## 2.7 Afficher

Appuyez sur le bouton "Affichage" pour ouvrir ce menu. Le menu "Affichage" comporte les trois boutons suivants:

- Couleur
- Contraste
- Surbrillance



### 2.7.1 Couleur

Cette option est disponible uniquement lorsque le sous-menu Contraste est activé. Appuyez sur le bouton Couleur pour choisir une combinaison de couleurs à haut contraste pour l'avant-plan et l'arrière-plan. Les combinaisons de couleurs disponibles sont les suivantes :

- Blanc sur Noir
- Noir sur Blanc
- Noir sur Jaune
- Jaune sur Noir
- Bleu sur Jaune
- Jaune sur Bleu
- Rouge sur Noir

- Noir sur Rouge
- Vert sur Noir
- Noir sur Vert
- Violet sur Noir
- Noir sur Violet

### 2.7.2 Contraste

Appuyez sur le bouton “Contraste” pour activer ou désactiver les couleurs de texte à contraste élevé. Les images sont toujours affichées avec leurs couleurs d’origine. Seulement les couleurs de l’avant-plan et de l’arrière-plan des textes seront changées.


### 2.7.3 Surbrillance

Cette option vous permet de sélectionner entre des mots en surbrillance, des lignes en surbrillance ou encore aucune surbrillance. La couleur des mots en surbrillance ou des lignes de surbrillance peut être changée de rouge à jaune. Les mots en surbrillance est la valeur par défaut.

## 2.8 Réglages


Appuyez sur le bouton “Réglages” pour ouvrir ce menu. Le menu Réglages comporte les trois boutons suivants :

- Voix
- Précédent
- Défaut

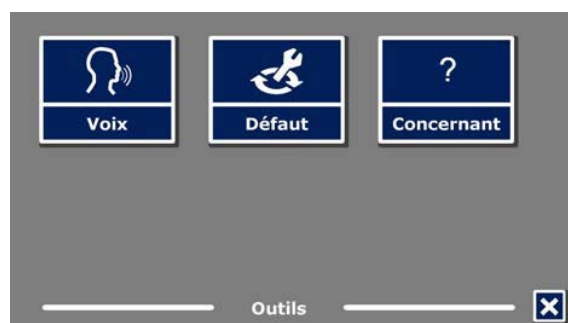

### 2.8.1 Voix


Le bouton “Voix” du menu Réglages ouvre une liste de toutes les voix et langues disponibles.

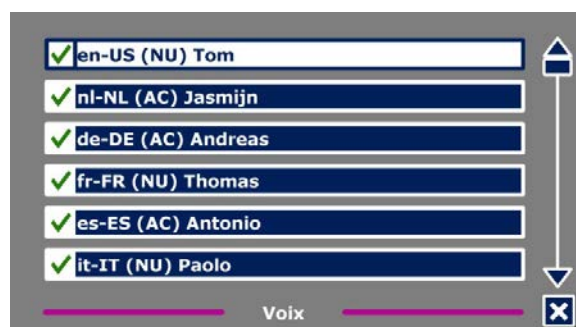

Pour activer une voix de lecture, sélectionnez-la dans la liste et appuyez sur celle-ci. Un crochet devant le nom de cette voix vous indique alors qu'elle est activée. Lorsque la voix est activée, elle devient disponible sous le bouton "Voix" du menu principal. Si vous désactivez une voix, elle ne sera plus disponible à partir de ce bouton. Les voix de lecture activées apparaissent toujours en tête de liste.

### 2.8.2 Précédent

Appuyez sur ce bouton si vous désirez revenir aux réglages par défaut. Le ClearView C Speech vous demandera si vous êtes certain de vouloir restaurer les réglages par défaut. Pour ce faire, appuyez sur "Oui". Pour annuler la restauration des réglages par défaut, appuyez sur "Non".

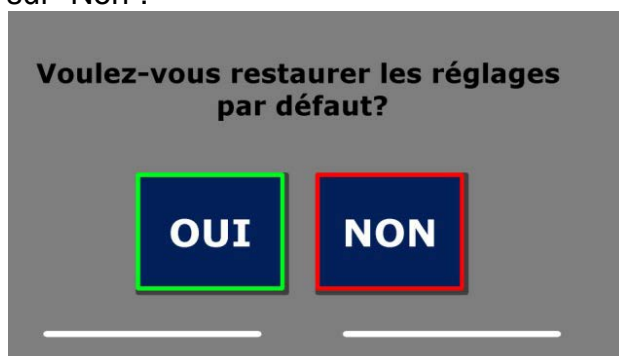

Réglages par défaut

**Affichage** Contraste élevé activé

**Couleur** Noir sur Blanc

**Surbrillance** Mots