



iView 7 HD

Guide d'utilisation



Version 1.0

Table des matières

iView 7 HD.....	1
Guide d'utilisation	1
Description.....	3
1. Composition de la boîte	3
2. Principaux Boutons.....	4
3. Utilisation du produit	5
3.1 Utilisation des fonctions principales.....	5
4. Dépannage.....	10
5. Guide de sécurité.....	11
6. Caractéristiques techniques.....	12

Description

L'IView 7 HD est une loupe électronique HD intégrant un écran de 7 pouces, une caméra permettant un grossissement de près ou de loin.

L'écran HD 7 pouces, à fort contraste, permet une lecture confortable et précise.

La connectique HDMI donne des options intéressantes de traitement de l'image.



L'utilisation de la camera vous permet d'agrandir du texte ou des objets dans une distance comprise entre 6,8 cm et 6 m. La caméra rotative vous permet de changer le mode de vision (de près ou de loin) très facilement.

1. Composition de la boîte

Vous trouverez dans la boîte du produit :

I View 7 HD	1 pc
Adaptateur pour recharge	1 pc
Câble HDMI	1 pc
Manuel d'utilisation	1 pc
Sacoche de protection	1 pc


2. Principaux Boutons

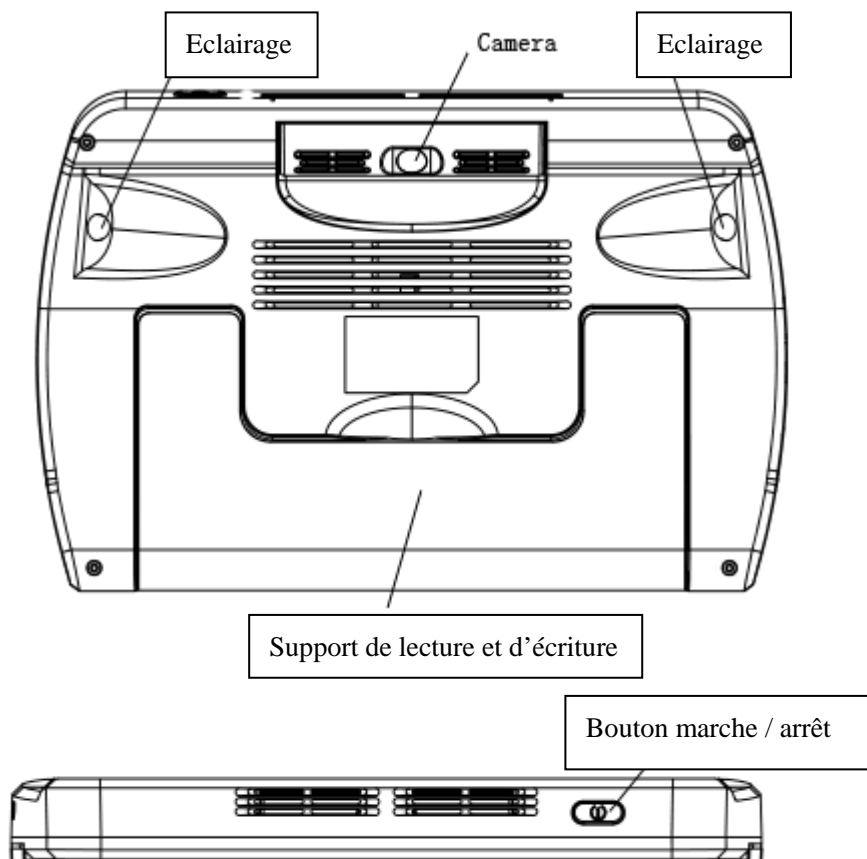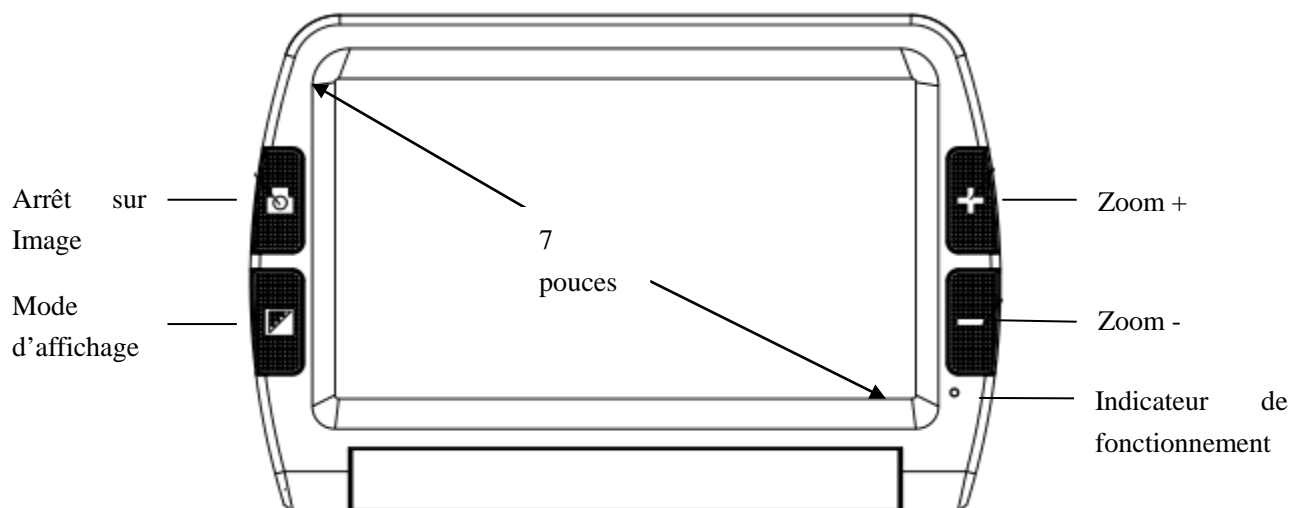

3. Utilisation du produit


3.1 Utilisation des fonctions principales.

3.1.1 Allumer / Eteindre l'iView 7 HD.

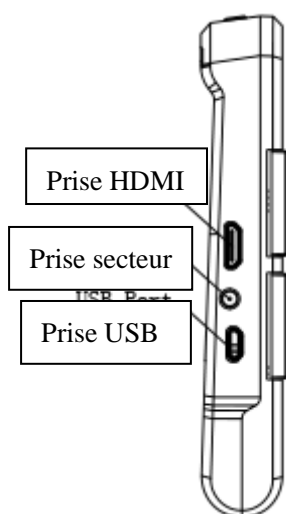


- Pour allumer l'iView 7, appuyez sur le bouton Marche / Arrêt pendant 3 secondes jusqu'à ce qu'un « beep » retentisse. Une image avec notre logo apparaîtra pendant 2 secondes, puis le produit sera en état de fonctionnement.
- Pour l'éteindre, appuyez sur le bouton Marche / Arrêt pendant 2 secondes.

3.1.2 Grossissement

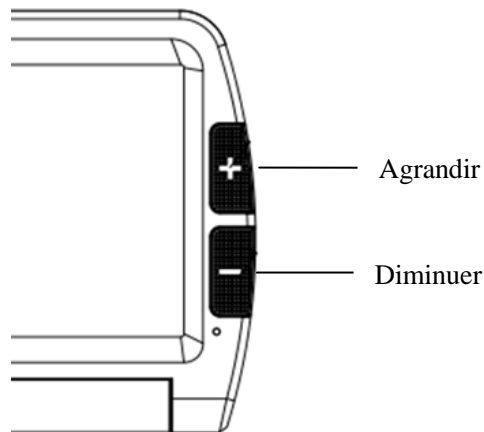

- Appuyez sur le bouton “+” pour agrandir le texte et sur le bouton “-” pour le diminuer.

3.1.3 Mode contraste des couleurs et Fonction Eclairage de la caméra

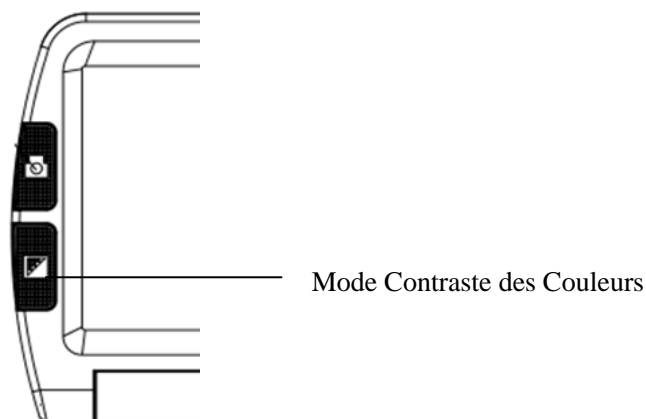

- Un mode normal et un mode favori sont disponibles pour le choix contraste des couleurs.
- Appuyez sur le bouton contraste des couleurs et maintenez le appuyé pendant 2 secondes pour basculer du mode normal au mode favori.




- En mode favori, appuyez sur le bouton mode pour faire défiler les 3 modes de base: en couleurs, votre contraste de couleurs préféré, et mode négatif (comme par exemple blanc sur fond bleu ou bleu sur fond blanc).
- En mode normal, appuyez sur le bouton mode pour faire défiler les 12 modes couleurs:
 - Couleurs
 - Gris
 - Blanc sur fond noir
 - Noir sur fond blanc
 - Blanc sur fond bleu
 - Bleu sur fond blanc
 - Jaune sur fond noir
 - Noir sur fond jaune
 - Bleu sur fond jaune
 - Jaune sur fond bleu
 - Vert sur fond noir
 - Noir sur fond vert
- Appuyez sur le bouton de contraste des couleurs et maintenez le appuyé pendant 5 secondes pour allumer ou éteindre les lumières de la caméra.

3.1.4 Ajustement de la luminosité

- Appuyez à la fois sur le bouton “Freeze” et le bouton “Zoom +” pour entrer dans la fonction ajustement de la luminosité.
- Une barre de luminosité apparaît, appuyez sur « Zoom + » pour augmenter la luminosité et sur « Zoom - » pour la diminuer.

3.1.5 Fonction Freeze

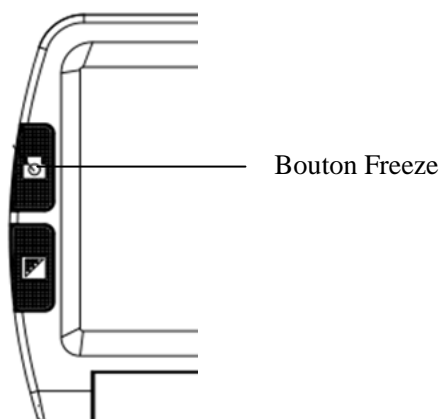

- Utilisez le bouton Freeze pour geler des images et des lettres, rapprochez alors l'appareil pour mieux regarder la capture d'image. Vous pouvez aussi agrandir ou rétrécir l'image en utilisant le bouton +/- et changer le mode de contraste en utilisant le bouton mode Contraste. Appuyez à nouveau sur le bouton « Freeze » pour revenir en mode lecture.



3.1.6 Réglage de la fonction mémoire

- L'appareil mémorisera automatiquement les réglages les plus récents (ex: mode couleurs, agrandissement, format de sortie vidéo, sons des boutons, luminosité) et les réutilisera à la prochaine utilisation

3.1.7 Fonction économie d'énergie.

- En mode agrandissement, l'appareil s'éteindra automatiquement après 3 minutes de non-utilisation.

3.1.8 Sortie HDMI

- Si la taille de l'écran ne vous suffit pas, vous pouvez utiliser la sortie HDMI pour vous connecter à un écran de télévision ;
- Après avoir connecté la sortie HDMI à la télévision, allumez l'appareil et l'image basculera automatiquement sur l'écran de la télévision.

3.1.10 Fonction vision de loin / vision de près.

- Quand vous lisez des supports papiers comme des livres, vous pouvez choisir le mode vision de près.
- Quand vous souhaitez voir les objets à une certaine distance, vous pouvez choisir le mode vision de loin.
- Pour basculer du mode vision de loin au mode vision de près, vous devez tout simplement faire pivoter la caméra.

4. Dépannage

Problèmes	Solutions
Ecran noir	<ul style="list-style-type: none"> ● Vérifier que l'appareil est allumé ● Vérifier que la caméra n'est pas protégée par son cache. ● Diminuer l'agrandissement
Impossible d'allumer l'appareil	<ul style="list-style-type: none"> ● Vérifier que la batterie est insérée et qu'elle n'est pas déchargée. ● Essayer de brancher le câble d'alimentation pour allumer l'appareil. ● Appuyez à la fois sur le bouton marche/ arrêt et sur le bouton mode des couleurs pour allumer.
Image sombre et/ ou déformée	<ul style="list-style-type: none"> ● Vérifier que les documents à lire sont bien à plat. ● Vérifier que les lumières de la caméra ne sont pas éteintes.
Pas d'affichage après connexion à la télévision	<ul style="list-style-type: none"> ● Vérifier que la télé est allumée ● Vérifier que le câble est compatible avec une sortie HDMI et bien connecté à la télévision. ● Vérifier qu'il s'agit du bon mode de sortie HDMI
Impossibilité de recharger la batterie.	<ul style="list-style-type: none"> ● Vérifier que la prise est correctement branchée.
Image floue	<ul style="list-style-type: none"> ● Appuyez sur le bouton Freeze et maintenez-le enfoncé pendant 6 secondes pour régler la mise au point automatique.



5. Guide de sécurité

Pour garder votre vidéo loupe en bon état, merci de BIEN respecter le guide de sécurité suivant.

- Ne pas exposer l'iView7 **HD** à une chaleur excessive ou à la lumière directe du soleil pour prévenir les risques d'incendie.
- Garder à l'abri de l'humidité, de la pluie de tout liquide ou produit chimique.
- Ne pas utiliser près d'appareils médicaux insuffisamment protégés.
- Utiliser la loupe à des températures comprises entre 10°C et 40°C.
- N'essayez pas de réparer la loupe vous-même ou d'ouvrir l'appareil, sous peine d'annuler la garantie. Contactez votre revendeur pour envoyer l'appareil en réparation si nécessaire.
- Veillez à toujours débrancher l'appareil avant de le nettoyer. Utiliser un chiffon doux humide pour nettoyer l'extérieur. Ne pas utiliser de détergents ou produits abrasifs qui pourraient endommager votre appareil.
- Utiliser l'adaptateur fourni pour recharger l'appareil, pour éviter de l'endommager.

6. Caractéristiques techniques

- Agrandissement: 2.3X ~ 19X
- Modes de contraste des couleurs : 12 modes (3 modes favoris des couleurs)
- Ecran : 7 pouces ISP LCD
- Appareil photo: Mise au point: 5M pixels
- Variation du grossissement: Sélectionner le grossissement adapté
- Distance de vue: 6.8cm ~ 600cm (2.68~ 236.22")
- Fonctions: Gel d'image, Changement du mode couleurs, Zoom avant / arrière
- Réglages sauvegardés après extinction
- Mise en veille: Le iView7 HD s'éteint automatiquement après 3 minutes de non utilisation
- Connection HDMI
- Chargeur: Entrée 110—240V
- Autonomie: 5 heures maximum
- Temps de charge: 4~5 Heures
- Poids total: < 440g
- Dimensions: 195mm*139.5mm*25mm