



Guide de référence de :

Eye-Pal v.1.1

Table des matières

Guide de référence de :	1
Eye-Pal v.1.1	1
FONCTIONS DE LECTURE DEPUIS LE PAVE NUMERIQUE ACTIF D'UN CLAVIER AZERTY 105 TOUCHES :	3
FONCTIONS DE LECTURE DEPUIS LE CLAVIER AZERTY D'UN PC PORTABLE :	4
Fonctions générales communes :	5
Commandes de gestion des livres (Zoom-Book) :	5
Touches de fonctions du menu livre :	5

FONCTIONS DE LECTURE DEPUIS LE PAVE NUMERIQUE ACTIF D'UN CLAVIER AZERTY 105 TOUCHES :

Activer/Désactiver la caméra : Insert + Supprim.
Lecture de la page entière depuis le début : Insert + 2
Reprise de la lecture après un pause : Insert + 1
Arrêt de la lecture (Pause) : Insert + 1 ou 2

Lecture par mot :

Suivant : Insert + 6
Répéter le mot : Insert + 5
Précédent : Insert + 4

Lecture par caractères :

Suivant : 6
Répéter le caractères : 5
Précédent : 4

Lecture par phrase :

Suivante : 2
Phrase en cours : Contrôle + Insert. + 5
Précédente : 8

Lecture par section :

Suivante : Contrôle + 2
Section en cours : Majuscule + insert + 5
Précédente : Contrôle + 8

FONCTIONS DE LECTURE DEPUIS LE CLAVIER AZERTY D'UN PC PORTABLE :

Activer / Désactiver la caméra : Espace (ou Verr. Maj. + .)

Lecture de la page entière depuis le début : E (ou Verr. Maj. + Flèche bas)

Arrêt / Reprise de la lecture (Pause) : X (ou Verr. Maj. + FIN)

Lecture par mot :

- Suivant : Contrôle + Flèche Droite
(ou Verr. Maj. + Flèche Droite)
- Répéter le mot : Contrôle + i
- Précédent : Contrôle + Flèche Gauche
(ou Verr.Maj. + Flèche Gauche)

Lecture par caractères :

- Suivant : Flèche Droite
- Répéter le caractères : i
- Précédent : Flèche Gauche

Lecture par phrase :

- Suivante : Flèche Bas
- Phrase en cours : Contrôle + Verr. Maj. + i
- Précédente : Flèche Haut

Lecture par section :

- Suivante : Contrôle + Flèche Bas
- Section en cours : Verr. Maj. + Majuscule + i
- Précédente : Contrôle + Flèche Haut

Fonctions générales communes :

Augmenter le débit de la voix : Majuscule + Q

Diminuer le débit de la voix : Majuscule + Z

Obtenir une description de la page : Majuscule + E

Arrêter la synthèse : Contrôle (selon la version du clavier)

Commandes de gestion des livres (Zoom-Book) :

Ajouter une page : A

Page suivante : N

Page précédente : P

Accéder au menu déroulant du livre : ALT + L

Touches de fonctions du menu livre :

Créer un nouveau livre : C

Ouvrir un livre : O

Supprimer un livre S

Fermer le livre en cours F

Enregistrer le livre sous : E + Entrée

Enregistrer le texte du livre : 2 fois E + Entrée

Ajouter des pages : A

Supprimer la page : S + Entrée